

Mode d'emploi

VOCAFLEX

Distributeur Benelux

Table de matière

	Page
Au sujet de VocaFlex	3
Flexibilité	3
Grilles et feuilles de travail	3
L'échange des grilles	3
Codes barre	3
Disquette	4
Volume	4
LED	4
Microphone	5
MARCHE/ARRÊT automatique	5
Batteries	5
Interrupteur prise de son	5
Effectuer une enregistrement vocal	6
Généralités	6
Avant l'enregistrement	6
Enregistrement vocal	6
Enregistrement vocal via une touche	6
Enregistrement vocal via une série de deux touches	7
Enregistrement raté	7
Reproduction de la parole	7
Reproduction de la parole via une série de deux touches	8
L'écoute du vocabulaire d'une grille	8
Effacer un enregistrement	8
Effacer tous les messages sur le VocaFlex	9
Le chargement des batteries	10
Entretien	10
Le VocaFlex est livré avec les accessoires suivants	10
Spécifications	10
Résumé du mode d'emploi	11

A Propos du VocaFlex

VocaFlex est un petit appareil portable aisé à l'emploi et ayant beaucoup de capacité qui est utilisé comme aide et soutien de la communication.

Cet appareil améliore et élargit les possibilités de communication pour les personnes ayant un handicap de la parole, par l'emploi de la parole digitale. La pression d'une touche reproduit la parole enregistrée préalablement.

Différents symboles, signes graphiques, lettres ou images peuvent être mis sur les touches pour la mémorisation des messages.

Le VocaFlex est pourvu de deux batteries Lithium-ion de longue durée.

Flexibilité

VocaFlex est conçu d'une telle façon qu'il est d'un usage facile pour l'utilisateur et son entourage. Le VocaFlex est très flexible car les grilles peuvent être aisément changées. Vous pouvez enregistrer des mots ou des phrases. VocaFlex a un total de 64 minutes de temps d'enregistrement.

Grilles et feuilles de travail

Une feuille transparente est montée derrière chaque grille. Un message peut être enregistré sous chaque touche de la grille. Vous pouvez enregistrer un message soit sous une seule touche soit sous une combinaison de 2 touches. Ainsi, avec une grille de 16 touches, vous pouvez enregistrer 256 messages.

Dans ce paquet vous trouverez 10 grilles avec à l'arrière une pellicule protectrice transparente. Les grilles ont 4-8 ou 16 touches. En plus, ce paquet contient aussi 10 pages ayant 51 feuilles de travail pour enregistrer les messages. Vous y trouvez également une page ayant trois feuilles d'entretien avec lesquelles vous pouvez, entre autre, effacer les messages. A l'arrière de chaque feuille de travail vous pouvez mettre un code barre grâce auquel VocaFlex identifie la feuille de travail.

Après avoir mis les symboles sur la feuille de travail, du côté auto collant transparent, vous placez la feuille de travail avec le côté des symboles vers la grille.

Le changement des grilles.

Il est très facile de changer une grille sur le VocaFlex ; avec laquelle vous changez par ailleurs le vocabulaire ! Cela se fait très simplement grâce au bord magnétique de la grille, qui se fixe d'elle-même. Les grilles sont conçues de telle façon qu'elles s'adaptent d'une seule manière sur le VocaFlex. Ceci signifie que les utilisateurs ayant une mobilité motrice limitée peuvent aussi changer de grille eux-mêmes.

Codes barre

Les codes barre se trouvent à l'arrière des feuilles de travail. Chaque code barre est unique et donne au VocaFlex les informations suivantes :

- Nombre de touches actives
- Messages qui sont sauvés sous une touche ou sous une série de 2 touches
- Nombre de secondes pour la parole

Dans ce paquet vous trouvez ce genre d'aperçu. Il est conseillé de sauver sur un 'back up' l'aperçu des messages. Un classeur est joint à ce paquet. Avec votre VocaFlex vous recevez également des feuilles de travail vierges.

Lorsqu'une feuille de travail est abîmée ou usée vous pouvez transcrire le code barre avec un crayon-feutre noir sur une nouvelle feuille de travail. Si le VocaFlex ne réagit pas bien à ces codes barre, c'est parce que les blocs ne sont pas assez noirs où ne sont pas dessinés correctement..

Disquette

Ce paquet contient une disquette sur laquelle se trouve les feuilles de travail de VocaFlex. Vous devez posséder le programme Boardmaker pour pouvoir utiliser cette disquette.

Volume

Il y a trois stands de volume. L'interrupteur pour le volume se trouve sur le côté du VocaFlex. Cet interrupteur porte le symbole d'un haut-parleur.

Volume de réglage

Figure 1 : régleur de volume

LED

Lorsque vous appuyez sur une touche sous laquelle la parole est enregistrée le LED s'allume en vert. Lorsque vous appuyez sur la première touche d'une série le LED clignote en vert pendant 10 secondes en attendant que vous appuyiez sur la touche suivante de la série. Après l'activation de la deuxième touche le LED s'arrête de clignoter et reste allumé.

Le LED devient rouge lorsque vous faites un enregistrement. Le LED clignote pendant dix secondes en rouge après que vous ayez appuyé sur la première touche de la série. Lorsque vous appuyez sur la deuxième touche sous laquelle vous allez enregistrer, le LED s'allume en continu en rouge.

Microphone

Le Microphone pour l'enregistrement de la parole, se trouve au devant du VocaFlex ; une petite élévation avec un petit trou. Cette élévation est prévue pour éviter qu'un liquide puisse couler dans le petit trou.

LED

Haut – parleur

Microphone

Figure 2 : Devant du Vocaflex

MARCHE / ARRÊT automatique

Le VocaFlex n'a pas de bouton de mise en marche / arrêt. Vous mettez simplement une grille sur le VocaFlex et le voilà prêt à l'usage. Après que vous ayez appuyé sur une touche et qu'un message se prononce le VocaFlex se met immédiatement en 'stand-by' jusqu'à ce que vous activiez à nouveau une touche.

Batteries

Dans le VocaFlex il y a 2 batteries Lithium-ion rechargeables ayant une capacité moyenne de 500mAh ou 8,4 V. La plupart des utilisateurs devront recharger le VocaFlex une ou deux fois par semaine. Nous conseillons aux utilisateurs actifs qui utilisent le VocaFlex plus de 2,5 h. par jour, de recharger l'appareil chaque jour. Ces batteries n'ont pas de mémoire, elles se rechargent toujours complètement.

L'interrupteur pour l'enregistrement de la parole

Au moment d'un enregistrement vous devez mettre cet interrupteur sur **enregistrement**. Vous trouvez cet interrupteur sur le côté du VocaFlex, à côté de l'interrupteur de volume. Cet interrupteur est enfoncé dans l'appareil, de façon à ne pas être activé par inadvertance.

Effectuer un enregistrement vocal

Généralités

Il est important que le VocaFlex se trouve à 15-20 cm de votre bouche. Ne parlez pas trop fort dans le microphone. Tenez le VocaFlex un peu sur le côté, de façon à ne pas diriger dans le microphone l'air qui se déplace par la voix.

Pour faire des enregistrements

Avant l'enregistrement réfléchissez bien à ce qui suit :

- Quels messages ou mots voulez-vous enregistrer ?
- Voulez-vous travailler avec 4-8 ou 16 touches ?
- Voulez-vous travailler avec des touches séparées ou avec des séries de 2 touches ?

Enregistrement de la parole

Vous choisissez une grille de 4,8 ou 16 touches ainsi qu'une feuille de travail. Vous devez aussi réfléchir si vous désirez enregistrer sous une touche ou une série de 2 touches ; ceci dépend du nombre de messages que vous voulez enregistrer pour votre utilisateur.

Interrupteur pour l'enregistrement de la parole

Figure 3. Interrupteur enregistrement de la parole

Enregistrement de la parole sous une touche :

- Choisissez une feuille de travail appropriée aux enregistrements sous une touche (feuille de travail 1 jusqu'à 39).
- Apportez des symboles sur la feuille de travail.
- Fixez cette feuille de travail derrière une grille ayant le même nombre de touches.
- Mettez la grille sur le VocaFlex.
- Glissez le bouton enregistrement/parole sur la 'position-enregistrement'.
- Appuyez sur la touche que vous voulez utiliser pour le message, tenez le microphone à 15 cm de votre bouche.
- Prononcez le message.

- Lâchez la touche.
- Glissez le bouton enregistrement/parole sur la 'position parole'
- Ecoutez si l'enregistrement a une bonne résonance, si non recommencez la procédure.

Pendant l'enregistrement le LED reste allumé continuellement sur rouge. Le LED rouge s'éteint lorsque vous lâchez la touche ou lorsque le temps d'enregistrement de cette touche est épuisé. Si vous essayez d'enregistrer quand le temps d'enregistrement est épuisé, le LED clignotera en rouge.

Enregistrement de la parole sous une série de deux touches.

- Choisissez une grille avec feuille de travail appropriée pour des enregistrements sous deux touches (feuille de travail 40 jusqu'à 51).
- Apportez des symboles sur la feuille de travail
- Fixez la feuille de travail en dessous de la grille.
- Mettez la grille sur le VocaFlex.
- Glissez le bouton enregistrement/parole sur la 'position-enregistrement'
- Appuyez sur la première touche que vous voulez utiliser de la série de deux pour l'enregistrement. Le LED clignote. Appuyez sur la deuxième touche endéans les 10 secondes et tenez le microphone à 15 cm de votre bouche.
- Prononcez le message.
- Lâchez la touche.
- Glissez le bouton 'enregistrement/parole' sur la 'position parole'.
- Ecoutez si l'enregistrement a une bonne résonance, si non recommencez la procédure

enregistrement râté

Si vous n'avez pas appuyez sur la deuxième touche de la série endéans les 10 secondes, le VocaFlex se met en position sommeil. Pour continuer l'enregistrement, recommencez la procédure.

Reproduction de la parole

- Mettez le bouton enregistrement-parole sur la 'position parole'.
- Appuyez sur la touche sur laquelle la parole doit être enregistrée.

Le LED s'allume en vert aussi longtemps que la parole est prononcée.

Interrupteur pour l'enregistrement de la parole

Figure 4. interrupteur pour la parole enregistrée.

La reproduction de la parole au moyen de séries de deux touches

- Mettez le bouton enregistrement/parole sur 'la position parole'.
- Appuyez sur la première touche sous laquelle la parole est enregistrée.
- Appuyez ensuite, endéans les 10 secondes sur la deuxième touche de la série.

Le LED VERT commence à clignoter après avoir appuyé sur la première touche. Ensuite le LED s'allume en vert aussi longtemps que la parole est prononcée. Rien ne se passera si rien n'a été enregistré sous cette combinaison. De même, rien ne se passe lorsque vous utilisez une grille sous laquelle rien n'a été enregistré. Ainsi qu'une grille sur laquelle l'enregistrement a été fait seulement sous quelques touches, rien ne se passera si vous appuyez justement sur une touche sous laquelle la parole n'a pas été enregistrée.

L'écoute du vocabulaire d'une grille .

Dans le classeur vous trouverez une feuille de travail pour l'entretien avec le texte '**Prononcez la grille suivante**'. La feuille de travail vous fait entendre tous les messages d'une grille spécifique

Se réalise de la façon suivante :

- Mettez la touche enregistrement/parole sur La position parole.
- Mettez la feuille de travail entretien avec le texte '**prononcez la grille suivante**' dans le VocaFlex.
- Appuyez sur une touche.
- Enlevez la feuille d'entretien et mettez la grille désirée.
- Appuyez sur une touche (cela doit se faire endéans les 60 secondes après l'enlèvement de la feuille d'entretien.

Tous les messages transmis par cette grille seront prononcés avec l'interval d'un petit arrêt.

Effacer un enregistrement

L'effacement de quelques messages

Un message peut s'effacer en le couvrant par l'enregistrement d'un nouveau message

L'effacement de tous les messages de la grille

Dans le classeur vous trouvez également une feuille de travail d'entretien sur laquelle se trouve le texte '**effacez la grille suivante**'. A l'aide de cette feuille de travail vous pouvez effacer tous les messages qui se trouvent sur une grille.

Se réalise de la façon suivante :

- Mettez la touche enregistrement/parole sur la position enregistrement.
- Placez sur le Vocaflex la grille d'entretien avec le texte '**effacez la grille suivante**'.

- Appuyez sur n'importe quelle touche.
- Retirez la feuille d'entretien '**Effacez la grille suivante**'.
- Placez sur le VocaFlex la grille que vous voulez effacer.
- Appuyez sur n'importe quelle touche, endéans les 60 secondes (le LED rouge clignote rapidement).

Tous les messages qui étaient enregistrés sur cette grille sont effacés.

Feuille d'entretien

Figure A4 Feuille d'entretien '**effacez la grille suivante**'

L'effacement de tous les messages sur le VocaFlex

Se réalise de la façon suivante :

- Mettez la touche enregistrement-parole sur le stand enregistrement
- Placez le feuille d'entretien avec le texte '**effacez tous les messages du VocaFlex**'
- Tenez bien cette feuille, vous verrez quatre lumières rouges qui s'allument simultanément pendant cinq secondes pendant que le LED clignote en rouge.
- Lâchez les touches, le LED reste allumé continuellement.
- L'effacement est commencé et le LED reste allumé jusqu'à ce que tous les messages soient effacés. **Ceci dure environ une heure.**

Feuille d'entretien

Figure 5. Feuille d'entretien '**effacez tous les messages sur le VocaFlex**'

Le chargement des batteries

Le VocaFlex est pourvu de deux batterie Lithium-ion. Une batterie-chargeur est livrée en même temps que le VocaFlex. Les batteries se chargent lorsque le chargeur est connecté à l'arrière du VocaFlex. Le chargement dure environ 4 heures.

Vous pouvez contrôler vous-même si le VocaFlex est bien chargé en appuyant sur une touche pendant que le chargeur est encore connecté. Appuyez sur n'importe quelle touche.

- Le LED ne s'allume pas du tout = l'appareil n'est pas connecté correctement
- Le LED s'allume en vert = L'appareil est occupé à se recharger.
- Le LED qui était allumé en vert s'éteint = l'appareil est complètement rechargé.

Nous vous conseillons de recharger l'appareil la nuit de façon à pouvoir l'utiliser pendant la journée.

raccordement pour le chargeur

figure 6. Raccordement pour le chargeur.

Entretien

Vous pouvez nettoyer régulièrement le VocaFlex au moyen d'une loque essorée dans un peu de savonnée. Attention ! l'appareil n'est pas étanche.

Lorsque les deux batteries internes du VocaFlex doivent être remplacées, veuillez prendre contact avec la firme Skil s.a.

Le VocaFlex est livré avec les accessoires suivants :

- 1 VocaFlex
- 1 Chargeur de batteries
- 10 Grilles
- 9 Pages A4 avec 51 feuilles de travail différentes pour les grilles.
- 3 Feuilles d'entretien
- 1 Feuille de travail avec symboles et textes préimprimés.
- 1 Mode d'emploi du VocaFlex
- 1 Apperçu à remplir – quelles grilles sont utilisées.
- 1 Disquette contenant les grilles à employer avec le programme 'boardmaker'

Spécifications

Poid :	290 grammes
Dimensions	16x10x3
Batterie	2 batteries Lithium-ion, capacité 500mAh, chargement 4heures
Consommation énergétique	Sleep : 0,6Ma
	Mode parole : environ 50mA
	Mode d'enregistrement : environ 753A
Temps total d'enregistrement :	64 minutes

RESUME DU MODE D'EMPLOI DU VOCAFLEX

Installer une feuille de travail sur une grille

- Choisissez une feuille de travail A4
- Mettez des textes ou des symboles sur la feuille de travail
- Choisissez une grille qui convienne à cette feuille de travail.
- Enlevé la pellicule protectrice de la grille
- Collez la feuille de travail derrière la grille.

Enregistrement de la parole sous une touche

- Choisissez une grille avec feuille de travail pour enregistrement sur une touche (feuille de travail de 1 jusqu'à 39).
- Mettez des symboles sur la feuille de travail
- Collez cette feuille de travail derrière une grille ayant la même quantité de touches.
- Placez la grille sur le VocaFlex.
- Glissez le bouton enregistrement/parole sur le stand enregistrement.
- Appuyez sur la touche que vous voulez employer pour le message, tenez le micro à 15 cm. de votre bouche.
- Prononcez le message.
- Lâchez la touche.
- Glissez le bouton enregistrement/parole sur le stand parole.
- Écouté si le message est bien prononcé, aussi non répétez la procédure.

Enregistrement de la parole sous une série de deux touches.

- Choisissez une grille avec feuille de travail pour enregistrement sous deux touches (feuille de travail de 40 jusqu'à 51)
- Mettez des symboles sur la feuille de travail.
- Placez cette feuille de travail en dessous d'une grille.
- Placez la grille sur le VocaFlex.
- Glissez le bouton enregistrement/parole sur le stand enregistrement.

- Appuyez sur la première touche de la série que vous voulez employer pour le message. Le LED clignote en rouge, appuyez maintenant endéans les 10 secondes sur la deuxième touche, tenez le micro à 15 cm. devant votre bouche.
- Prononcez le message.
- Lâchez la touche.
- Glissez le bouton enregistrement/parole sur le stand parole.
- Ecoutez si votre enregistrement est bien prononcé, aussi non répétez la procédure.

Reproduction de messages qui sont enregistrés sous une touche

- Soyez attentif à ce que le bouton enregistrement/parole se trouve sur le stand parole.
- Appuyez sur la touche sous laquelle l'enregistrement a été réalisé (le LED s'allume continuellement en vert jusqu'à ce que le message soit reproduit)

Reproduction de messages qui sont enregistrés sous une série de deux touches.

- Soyez attentif à ce que le bouton enregistrement-parole se trouve sur le stand parole.
- Appuyez sur la première touche de la série sous laquelle l'enregistrement a été réalisé.
- Appuyez endéans les dix secondes sur la deuxième touche de la série. (le LED commence à clignoter au moment où vous appuyez sur la première touche, ensuite le LED reste allumé jusqu'à ce que le message soit reproduit).