



Communication à l'aide d'interrupteurs vocaux



4Talk4

Le « 4talk4 » est un appareil de communication simple et robuste à voix enregistrée ou digitalisée. L'accès peut se faire soit à l'aide des 4 touches de couleur bien visibles, soit si l'accès à ces touches est malaisé, via d'autres contacteurs externes. Chaque touche permet de travailler sur quatre niveaux. On peut donc enregistrer jusqu'à 16 messages différents (temps total d'enregistrement: 4 minutes). En extra on peut aussi y brancher des jouets fonctionnant sur batteries. On pourra ainsi par exemple enregistrer sous une touche le message « j'ai chaud ! », y associer un symbole représentatif et mettre en route un ventilateur....

Utilisateurs

4 TALK 4 est un outil de communication spécialement conçu pour une utilisation en classe pour des élèves (multi utilisateurs) ayant des difficultés de communication associées à des besoins de communication de base.

Fonctionnement

De par sa forme et ses dimensions, le 4Talk4 est très facile à utiliser et à positionner sur une table. Quatre touches de couleur différentes à utiliser « telles quelles » à l'aide du guide doigt ou à l'aide de quatre contacteurs externes plus appropriés.

Possibilité d'enregistrer jusqu'à 16 messages différents (capacité totale d'enregistrement de 4 minutes). Possibilité d'utiliser des contacteurs plus appropriés si le besoin s'en fait sentir, pochettes en plastique pour utilisation des touches en association avec des pictogrammes. En association avec un message préenregistré, on peut via les sorties « jack » prévues à cet effet, faire s'animer un jouet sur batteries ou tout autre appareil électrique. Le volume est également réglable et le son est de bonne qualité. L'enregistrement des messages, leur remplacement et le changement de niveau sont un jeu d'enfant.

Specifications

- Capacité de la mémoire: maximum de 4 minutes d'enregistrement
- Poids: 1.340 g
- Dimensions: 13 x 32.5 x 9.5 cm
- Touches: hexagonales 6,5 cm.
- Alimentation: batteries 4 x 1,5 V

Adaptations

- L'utilisation de contacteurs externes (Piko, Buddy Button, etc...) est possible
- Possibilité d'y raccorder des jouets sur batteries qui seront mûs durant l'activation de la touche et l'énoncé du message enregistré.

Remarque: le jouet doit être au préalable équipé d'un raccord batteries spécial ou alors utiliser un Power Link

Simple d'utilisation

Travailler avec le 4Talk4 est d'une simplicité enfantine et ne requiert que peu d'apprentissage pour l'avoir bien en mains: ré-enregistrement de nouveaux messages, changement de symboles en fonction des besoins propres de l'utilisateur.

Accessoires

Livré en standard avec deux câbles dont un permettant le branchement d'un jouet (adaptateur PPC/T-4379).